

ポータブルトイレ等の消毒方法



1. 肘掛け

2. 便座の座面

3. トイレ本体の上面
(汚染があれば)



流す

消毒液をしみこませた
布やペーパータオルで
(一方向性に) 拭き取ります

- ・ 高頻度に使用者が**手で直接触れる場所**を塩素系消毒剤等を使って**ふき取り消毒**してください
(消毒剤を噴霧もしくは薄く塗りつけるだけでは十分な効果を得られません、汚染を物理的にふき取ることが大切です)
- ・ 背もたれやトイレ本体の側面は、通常は必要ありませんが、身体を支えるとき等に**手で触れた場合には消毒範囲**に加えましょう